

MANUAL DE USO

MNPG363-00 Edición 25/08/21

F3S2000 y F2S700

Aplicadores de banda con solenoides

I.A.C.E.R. Srl

www.itechmedicaldivision.com

Introducción

Los dispositivos **F3S2000** y **F2S700** son respectivamente aplicadores con dos y tres solenoides para magnetoterapia de baja frecuencia.

Se adaptan fácilmente a cualquier zona del cuerpo gracias a la presencia del elástico terapéutico.

Los dispositivos están clasificados como clase I, de acuerdo con la regla 1 (4.1) prevista en el anexo VIII del Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo del 5 de abril de 2017 sobre productos sanitarios.

UDI-DI básico: 8019781PEMFLFFASNS

F3S2000 UDI-DI: (01)08019781472052

F2S700 UDI-DI: (01)08019781472212

Información técnica

Características técnicas:

- Tamaño del aplicador: 38x9 cm + elástico de 60 cm;
- Longitud del cable: 158 cm;
- 3 solenoides o 2 solenoides;
- 1 cable de conexión;
- Modelo F3S2000 compatible con los modelos MAG2000 y modelos LaMagneto.
- Modelo F2S700 compatible solo con el modelo MAG700.

Etiquetado



Etiqueta 1 / Label 1

Etiqueta 1 - Label 1

Modelo F3S2000



Modelo F2S700




Etiqueta cable:

Modello / Model: F3S2000





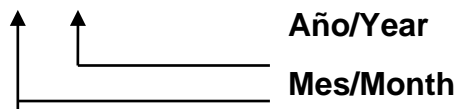


Modello / Model: F2S700



Símbolos:

Símbolo	Significado
	Logotipo del fabricante.
	De acuerdo con el Reglamento (UE) núm. 2017/745
	Datos del Fabricante.
	Fecha de fabricación (MM-AAAA).
	Producto sanitario.

Símbolo	Significado
	Siga las instrucciones de uso.
	Directiva RAEE para la eliminación de residuos electrónicos.
	Parte aplicada tipo BF.
	Temperaturas permitidas (temperaturas de almacenamiento, en el embalaje).
	Humedad relativa (humedad relativa de almacenamiento, en embalaje).

Transporte y almacenamiento

No se requieren cuidados particulares durante el transporte. En cuanto al almacenamiento, el equipo está protegido hasta las siguientes condiciones ambientales:

temperatura ambiente de +5 a + 40 °C

humedad relativa del 15 al 93%

Modo de empleo

Instrucciones de uso de F3S2000 y F2S700

Siga las instrucciones del Manual de Uso que acompaña al dispositivo.

Siga las advertencias expuestas en los manuales de uso de los productos MAG700, serie MAG2000 o de la familia LaMagneto.


Cuidado de F3S2000

Limpieza de F3S2000 y F2S700

Para la limpieza de F3S2000 y F2S700 se recomienda desconectar el aplicador de tres/dos solenoides del dispositivo antes de realizar cualquier operación. Limpie la tela con un paño humedecido simplemente con agua y jabón neutro y espere que se seque por completo antes de volver a utilizar el aplicador con tres solenoides para una sesión terapéutica.

Información para la eliminación



El producto está sujeto a la normativa RAEE (presente en la etiqueta con el símbolo ) sobre recogida selectiva: para desechar el producto, use áreas especiales equipadas para la recogida de material electrónico contactando con las autoridades competentes de su país o directamente con el fabricante.

Mantenimiento y asistencia

El dispositivo no requiere ningún mantenimiento ordinario particular. Póngase en contacto con el fabricante para que se compruebe la funcionalidad del dispositivo cada dos años.

El fabricante es el agente exclusivo para intervenciones de asistencia técnica en el aplicador F3S2000. Para cualquier intervención de asistencia técnica, comuníquese con:

I.A.C.E.R. S.r.l.

Via S. Pertini, 24 / a • 30030 Martellago (VE)

Tel. +39 041.5401356 • Fax +39 041.5402684

Garantía

F3S2000 está cubierto por una garantía de 2 años a partir de la fecha de compra. La garantía queda anulada en caso de manipulación, falta de cuidado y uso inadecuado del aplicador, y en caso de intervención en el mismo por parte de personal no autorizado por el fabricante o por el distribuidor autorizado.

Todos los derechos reservados. F3S2000 y F2S700 y el logo  son propiedad exclusiva de I.A.C.E.R. Srl y están registrados.



I.A.C.E.R. Srl

Via S. Pertini 24/A - 30030 Martellago (VE) - Italia / Italy

Tel.: (+39) 041/5401356 - Fax: (+39) 041/5402684

Email: iacer@iacer.it - PEC: iacer@pec.it - Web: www.itechmedicaldivision.com

