

POWER Q-6000 PLUS

Power Q-6000 Plus ist das neue Kompressionstherapiesystem für den professionellen Gebrauch, es fördert die Blutzirkulation durch das Aufblasen und Entleeren von Luftkammern.

Die Kompressionstherapie kann das Problem der Stagnation in beschädigten Blutgefäßen lösen; fördert die Beseitigung von überschüssigen interstitiellen Flüssigkeiten und begünstigt das reibungslose Funktionieren des Lymphsystems. Es ist daher sowohl für ästhetische Behandlungen (Behandlungen bei Cellulite) als auch bei Problemen in Bezug auf die Durchblutung und den Lymphfluss (Lymphödem) einsetzbar.



MERKMALE

- ✓ Stromversorgung 220-240V 50/60Hz
- ✓ Leistungsaufnahme 80 VA
- ✓ Zeit einstellbar von 0 ÷ 99 Minuten
- ✓ Druck einstellbar von 10 ÷ 240 mm Hg ± 10%
- ✓ 2 Ausgangs-Kanäle (Möglichkeit bis zu 3 Applikatoren anzuschließen)
- ✓ Graphisches Display
- ✓ 5 Programme
- ✓ 8 Geschwindigkeitsstufen des Luftstroms
- ✓ Gewicht: 9.5 Kg

MEDIZINPRODUKT DER KLASSE IIa.

Power Q-6000 Plus ist ein CE0476-zertifiziertes Medizinprodukt

HAUPTANWENDUNGEN

Lymphödem

Drainage des Arms nach Brustamputation

Lähmung der Gliedmaßen

Die Behandlung von Hämatomen nach Operationen


Kompression bei passivem Venenleiden

Behandlung von Cellulite im Anfangsstadium

Gelenkrheumatismus

Prophylaxe von postoperativen Venenthrombosen

PROGRAMME

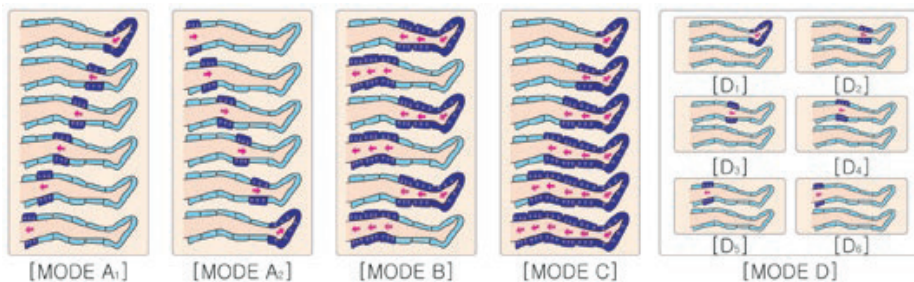

GERÄTEABMESSUNGEN

420 x 230 x 310 mm

POWER Q-6000 PLUS

HOW DOES IT WORK

Dank seiner zwei Ausgänge und den Verbindungsrohren mit 1 oder 2 Kabelverzweigungen, ermöglicht Power Q-6000 Plus den gleichzeitigen Anschluss von bis zu 3 Applikatoren: Diese Funktion ist äußerst nützlich, wenn die Behandlung des Bauches und der beiden Beine in der gleichen Sitzung ausgeführt werden soll.

Power Q-6000 Plus verfügt über 5 verschiedene Arten des Aufblasens der Luftkammern, 8 Geschwindigkeitsstufen des Luftstroms in den Kammern und die Möglichkeit den Druck und die Therapiedauer festzulegen. Auf diese Weise ist es möglich, jede Behandlung den therapeutischen Bedürfnissen des Patienten anzupassen.

Power Q-6000 Plus wird komplett ausgestattet geliefert: mit zwei Kompressions-Leggings mit je 6 Kompressionskammern, 2 plantaren Druckeinlagen, 2 Paar TNT Leggings für einen Patienten, einem Bauchband mit 6 Kompressionskammern, einem Armband mit 6 Kompressionskammern und den entsprechenden Verbindungsrohren mit 1 oder 2 Kabelverzweigungen.

ABMESSUNGEN DES ZUBEHÖRS

Beinmanschette

- ✓ Länge: circa 86 cm (von der oberen Extremität bis zur Ferse)
- ✓ Umfang Oberschenkel: circa 71 cm
- ✓ Umfang Fußgelenk : circa 42 cm

Armmanschette

- ✓ Länge: circa 86 cm
- ✓ Umfang Bizeps: circa 50 cm
- ✓ Umfang am Handgelenk: circa 36 cm

Bauchband

- ✓ Länge: circa 136 cm
- ✓ Höhe: circa 46 cm
- ✓ Taillenumfang: circa 55-110

