

## NOTICE D'UTILISATION

---

*MNPG372-02 Édition 15/01/2022*

# *TAP2000*

*I.A.C.E.R. Srl*

*[www.itechmedicaldivision.com](http://www.itechmedicaldivision.com)*

### **Introduction**

L'appareil **TAP2000** est un applicateur à 6 solénoïdes pour la magnétothérapie à basse fréquence.

Placé sur le dossier d'une chaise ou d'un fauteuil, il est conçu pour traiter la colonne vertébrale.

Le dispositif est classé dans la classe I, conformément à la règle 1 (4.1) visée à l'annexe VIII du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux.

UDI-DI de base : 8019781PEMFLFTAPQS

UDI-DI : 08019781472090

### Informations techniques

#### **Caractéristiques techniques :**

- Dimensions de l'applicateur : 40x40cm ;
- 6 solénoïdes ;
- 2 câbles ;
- Compatible avec les modèles MAG2000.





### Étiquette

Étiquette 1  
(derrière l'appareil)

Étiquette 1





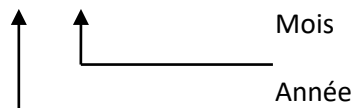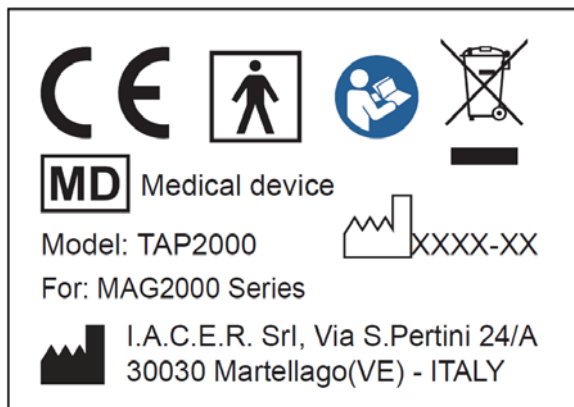



Étiquette câble



**Symboles :**

Symbole	Signification
	Logo du fabricant.
	Conforme au règlement (UE) n° 2017/745
	Données du fabricant.
	Date de fabrication (MM/AAAA).

Symbole	Signification
	Dispositif médical
	Suivre le mode d'emploi.
	Directive DEEE pour l'élimination des déchets électroniques.
	Partie appliquée type BF.
	Températures admises (température de stockage, sur confection)
	Humidité relative (humidité relative de stockage, sur confection)

## Transport et stockage

Aucune mesure particulière n'est à prendre pendant le transport. En ce qui concerne le stockage, l'appareil est protégé jusqu'aux conditions environnementales suivantes :

*température ambiante de +5 à + 40 °C*

*humidité relative de 15 à 93 %*

## Modalités d'utilisation

### **Mode d'emploi de TAP2000**


Respectez les consignes de la notice d'utilisation fournie avec votre appareil. Branchez le tapis aux deux canaux du dispositif.

Respectez les avertissements donnés dans les notices d'utilisation des produits MAG2000.

## Nettoyage de TAP2000

Pour le nettoyage de TAP2000, il est recommandé de débrancher l'applicateur à 6 solénoïdes du dispositif avant d'effectuer toute opération. Nettoyez le tissu avec un chiffon imbibé d'eau simple et de savon neutre et attendez qu'il sèche complètement avant de réutiliser l'applicateur à trois solénoïdes pour une séance thérapeutique.

## Informations pour l'élimination

Le produit est soumis à la norme DEEE (présence sur l'étiquette du symbole ) en matière de tri sélectif : pour l'élimination du produit, utiliser les lieux équipés pour la collecte de matériel électronique en contactant les autorités compétentes locales ou directement le fabricant.

## Maintenance et assistance

Aucun entretien particulier n'est requis. Contactez le fabricant pour la vérification biannuelle du fonctionnement du dispositif.

Le fabricant a l'exclusivité concernant les interventions d'assistance technique sur l'applicateur TAP2000. Pour toute intervention d'assistance technique, s'adresser à :

**I.A.C.E.R. S.r.l.**

Via S. Pertini, 24/a • 30030 Martellago (VE)

Tél. +39 041.5401356 • Fax +39 041.5402684

## Garantie

TAP2000 est couvert par une garantie de 2 ans à compter de la date d'achat. La garantie est nulle en cas d'altération, de négligence et d'utilisation inappropriée de l'applicateur et en cas d'intervention sur celui-ci par du personnel non autorisé par le fabricant ou le revendeur agréé.

## Notification des incidents

Conformément aux dispositions du Règlement (UE) 2017/745, le fabricant attire l'attention de l'utilisateur sur la nécessité de signaler tout incident grave survenu en relation avec le dispositif. Cette notification doit être adressée au fabricant du dispositif:

**I.A.C.E.R. Srl**

Via S. Pertini 24/a – 30030

Martellago (VE) ITALY

Tel. +39 041 5401356 – Fax +39 041 5402684

e-mail: [iacer@iacer.it](mailto:iacer@iacer.it)







**I.A.C.E.R. Srl**

Via S. Pertini 24/A - 30030 Martellago (VE) - Italia / Italy

Tel.: (+39) 041/5401356 - Fax: (+39) 041/5402684

Email: [iacer@iacer.it](mailto:iacer@iacer.it) - PEC: [iacer@pec.it](mailto:iacer@pec.it) - Web: [www.itechmedicaldivision.com](http://www.itechmedicaldivision.com)

