

MIO-CARE BEAUTY

Mio-Care Beauty es el dispositivo para electroterapia ideal para el paciente que desee tratar problemas relacionados con el dolor e imperfecciones locales.

DISPOSITIVO MÉDICO DE CLASE IIa

Mio-Care Beauty es un dispositivo médico CE0068



EQUIPAMIENTO

- ✓ Electroterapia TENS /EMS/FES con pantalla gráfica
- ✓ 2 cables de electrodos con 4 conexiones (total 8 electrodos conectables)
- ✓ Electrodos adhesivos pregelados
- ✓ Batería interna Ni-Mh recargable con nueva tecnología LL (long lasting) de baja autodescarga
- ✓ Cargador de la batería interna
- ✓ Pinza de enganche al cinturón
- ✓ Manual de uso e manual de colocación de los electrodos
- ✓ Bolsa de transporte

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Electroterapia combinada de 2 canales independientes;
- ✓ Generatore Generador de onda cuadrada bifásica compensada. La cantidad de corriente que circula entre positivo y negativo es igual y constante, evitando el peligroso efecto polar posible si se estimula con una onda no compensada
- ✓ Funcionamiento asíncrono de los canales de estimulación (lipólisis)
- ✓ Teclado digital con controles simples e intuitivos
- ✓ Instrucciones del programa en curso o tiempo restante visible directamente en pantalla
- ✓ Funcionamiento con batería interior recargable (extraíble)
- ✓ Display retroiluminado
- ✓ Intensidad máxima 100 mApp

DIMENSIONES DEL APARATO

135 X 61 X 25 mm

MIO-CARE BEAUTY

PROGRAMAS

20 PROGRAMAS MEDICOS

15 PROGRAMAS BELLEZA

01 Tens convencional (rápido)	16 Epitrocleitis	01 Fortalecimiento miembros superiores y tronco
02 Tens endorfinica (retrasada)	17 Periartritis	02 Fortalecimiento miembros inferiores
03 Tens con valores máximos	18 Microcorriente	03 Tonificación miembros superiores y tronco
04 Antiinflamatorio	19 Incontinencia por esfuerzo (sonda escl.)	04 Tonificación miembros inferiores
05 Cervicalgia/Cefalea miotensiva	20 Inco Incontinencia por urgencia (sonda escl.)	05 Definición miembros superiores y tronco
06 Lumbalgia/Ciatalgia		06 Definición miembros inferiores
07 Distorsiones/Contusiones		07 Modelación
08 Vascularización		08 Microlifting
09 Relajante		09 Lipólisis abdomen
10 Hematomas		10 Lipólisis muslos
11 Prevención atrofia		11 Lipólisis glúteos y caderas
12 Prevención atrofia		12 Lipólisis brazos
13 Dolores mano y muñeca		13 Elasticidad tejidos
14 Estimulación plantar		14 Capilarización
15 Epicondilitis		15 Pesadez de las piernas

¿FORMAS DE ONDA O NÚMERO DE PROGRAMAS?

Muchos dispositivos en el mercado ofrecen aparentemente un gran número de programas, con un mínimo gasto. Es bueno aclarar que el número de programas no debe confundirse con los nombres o el número de tratamientos. Algunos se basan en la ignorancia de los consumidores y el intercambio de programas y tratamientos. El mismo programa TENS CONVENCIONAL, por ejemplo, se puede aplicar hasta en 50 partes del cuerpo, pero es siempre el mismo programa con el mismo propósito, 1 programa y 50 aplicaciones del programa. Los programas son diferentes cuando uno o más de las siguientes variables son diferentes: Intensidad, frecuencia y duración de la estimulación. El TENS convencional trabaja por ejemplo entre 70 y 150 Hz, con una duración del impulso de 50/70 microsec por un tiempo de al menos 40 minutos. El TENS endorfinico trabajo entre 1 y 4 Hz, con una duración del impulso de 250/300 microsec por un tiempo de al menos de 20 minutos. Los objetivos son diferentes: en el primer caso, una reducción inmediata del dolor y no muy duradero en el segundo caso, una reducción del dolor y más duradero.

Es sólo un ejemplo para aclarar que los electroestimuladores no son todos iguales: es crucial para el éxito del tratamiento, el uso de equipos bien programados (por profesionales) y que tengan, no un gran número de programas teóricos, pero si una serie de formas de onda adecuadas para la consecución de los objetivos.