

I-TECH
MEDICAL DIVISION

**Sollievo dal dolore,
nella comodità
di casa tua.**

Sei in buone mani

Affidati agli specialisti della terapia del dolore
e della riabilitazione domiciliare.

Siamo qui per accompagnarti nel tuo percorso
di riabilitazione, prendendoci cura della tua salute
fino alla risoluzione del problema.

Cosa facciamo per te

Produciamo dispositivi elettromedicali **sicuri e facili** da usare in autonomia.

Ognuno di questi dispone di **programmi terapeutici preimpostati**, che ti consentono di iniziare a fare terapia in pochi semplici passi. E, se hai bisogno, **siamo sempre pronti ad aiutarti**.

In più, i nostri dispositivi sono **validati clinicamente e certificati** dagli Organismi Notificati designati dal Ministero della Salute, TÜV Rheinland Italia e MTIC Intercert.

Siamo già pronti alla connessione in telemedicina!

Magnetoterapia 4	App I-Tech Life 17	Pressoterapia 18
Elettroterapia 24	Ultrasuonoterapia 38	Diagnostica & DPI 44
Per il professionista 45	Finanziamento 49	Detrai il tuo dispositivo 50

Consulta il tuo medico, è importante. Tu riceverai una diagnosi accurata, noi potremo guidarti più facilmente verso la soluzione ideale per le tue esigenze.

INDICAZIONI TERAPEUTICHE

PATOLOGIE INFIAMMATORIE

OSTEOPOROSI

ARTROSI

ARTRITE

INFIAMMAZIONI

EDEMA OSSEO

FRATTURE


LOMBALGIA

ALGODISTROFIA

DOLORI ARTICOLARI

ULCERE

NEUROPATIE

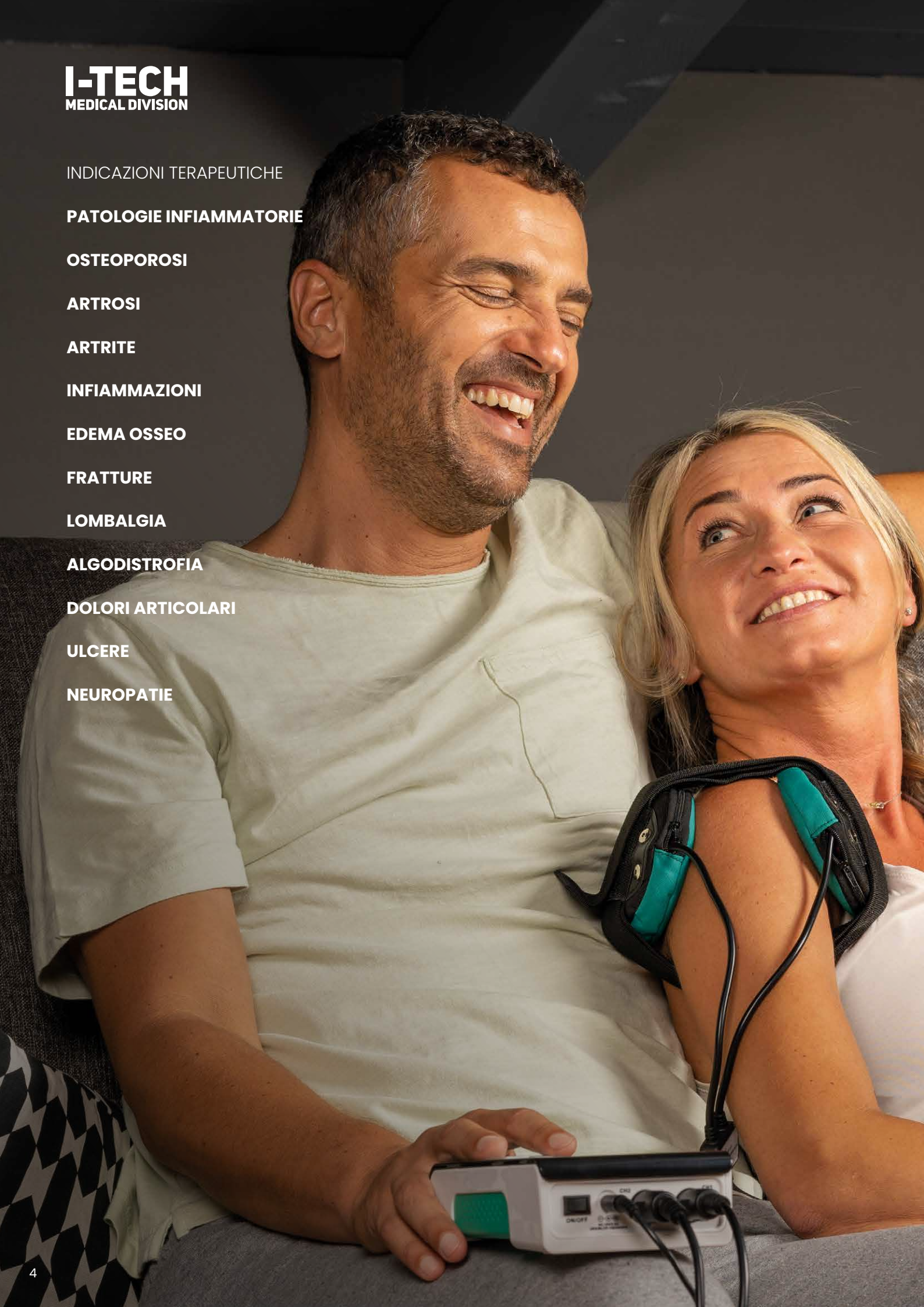

MAGNETOTERAPIA / CEMP

Riduci dolore e infiammazioni con la magnetoterapia.

L'alleato ideale per trattare patologie di tipo traumatico e cronico che colpiscono ossa, muscoli e articolazioni.

L'azione dei campi elettromagnetici pulsati aiuterà le cellule del tuo corpo a ripristinare il loro equilibrio e corretto funzionamento.

DURATA DEL TRATTAMENTO CONSIGLIATA



Almeno 2-4 ore
al giorno, in base
alla patologia.



45-90 giorni.
Eventualmente
ripetibile.

LAMAGNETO

Riduci dolore e infiammazioni comodamente a casa tua.
Fare magnetoterapia non è mai stato così facile!



Il 1° dispositivo
per magnetoterapia CEMP
certificato MDR in Europa.



Raccomandata
dai medici.

**INTENSITÀ FINO
A 150 GAUSS**

per ciascuno dei 2 canali



**FREQUENZA
DA 1 A 100 HZ**

ULCERE E NEUROPATIE

L'unico dispositivo per magnetoterapia certificato sia per ulcere che neuropatie.



**I-TECH
Life**

Collegabile all'APP

**2 TRATTAMENTI
PER SEDUTA**

e ottieni più risultati in meno tempo

**46 PROGRAMMI
PREIMPOSTATI**

per rendere semplicissima la tua terapia

**ANCHE IN
COMODE RATE
MENSILI**

Incluso nella dotazione



Aggiungi Osteomat!

Il materassino per trattamenti di lunga durata su tutto il corpo.

Scopriilo a pagina 12



CE 1936 MD

PROGRAMMI

01 Osteoporosi	13 Dolore lombo-sacrale	25 Tendinite	37 Sindrome da impingement
02 Artrosi	14 Artrosi spalla	26 Condropatia	38 Sindrome del tunnel carpale
03 Artrite	15 Artrosi ginocchio	27 Antinfiammatorio	39 Protesi titanio
04 Artrosi cervicale	16 Periartrite scapolo omerale	28 Colpo di frusta	40 Cuffia dei rotatori
05 Dolori articolari	17 Coxartrosi	29 Cicatrizzazione	41 Tunnel tarsale
06 Cervicalgia	18 Atrofie muscolari	30 Ulcere cutanee	42 Notturmo 1 Hz
07 Dolore cronico	19 Trattamento muscolare	31 Discopatia	43 Notturmo 15 Hz
08 Fratture	20 Osteonecrosi	32 Mialgia	44 Notturmo 50 Hz
09 Epicondilite	21 Algodistrofia	33 Neuropatia	45 Notturmo 75 Hz
10 Epitrocleite	22 Lesione cartilaginea	34 Strappo muscolare	46 Scansione automatica (Autoscan)
11 Pseudoartrosi	23 Lesione legamento	35 Crampo muscolare	
12 Lombalgia	24 Edema osseo	36 Rizartrosi	



Dispositivo progettato e certificato in Italia

-19% È un dispositivo medico detraibile

LAMAGNETO PRO

Ancora più semplice, ancora più sicura. Blocca il programma con la password e avvia sempre la terapia corretta.



63 PROGRAMMI PREIMPOSTATI

per rendere semplicissima la tua terapia

TRATTAMENTI PERSONALIZZATI

grazie alle 10 memorie libere

2 TRATTAMENTI PER SEDUTA

e ottieni più risultati in meno tempo

BLOCCA CON PASSWORD

e sei sicuro di non variare i parametri di terapia corretti



TRACCIA LE TERAPIE ESEGUITE

con il contatore integrato

INTENSITÀ FINO A 200 GAUSS

per ciascuno dei 2 canali

FREQUENZA DA 1 A 120 HZ

per impostare proprio i parametri prescritti dal tuo medico

ANCHE IN COMODE RATE MENSILI



Il 1° dispositivo per magnetoterapia CEMP certificato MDR in Europa.



Collegabile all'APP




Raccomandata dai medici.

Incluso nella dotazione



PROGRAMMI (LAMAGNETO PRO E LAMAGNETO X)


01 Osteoporosi	09 Epicondilite	17 Coxartrosi	25 Tendinite
02 Artrosi	10 Epitrocleeite	18 Atrofie muscolari	26 Condropatia
03 Artrite	11 Pseudoartrosi	19 Trattamento muscolare	27 Antinfiammatorio
04 Artrosi cervicale	12 Lombalgia	20 Osteonecrosi	28 Colpo di frusta
05 Dolori articolari	13 Dolore lombo-sacrale	21 Algodistrofia	29 Cicatrizzazione
06 Cervicalgia	14 Artrosi spalla	22 Lesione cartilaginea	30 Ulcere cutanee
07 Dolore cronico	15 Artrosi ginocchio	23 Lesione legamento	31 Discopatia
08 Fratture	16 Periartrite scapolo omerale	24 Edema osseo	32 Mialgia

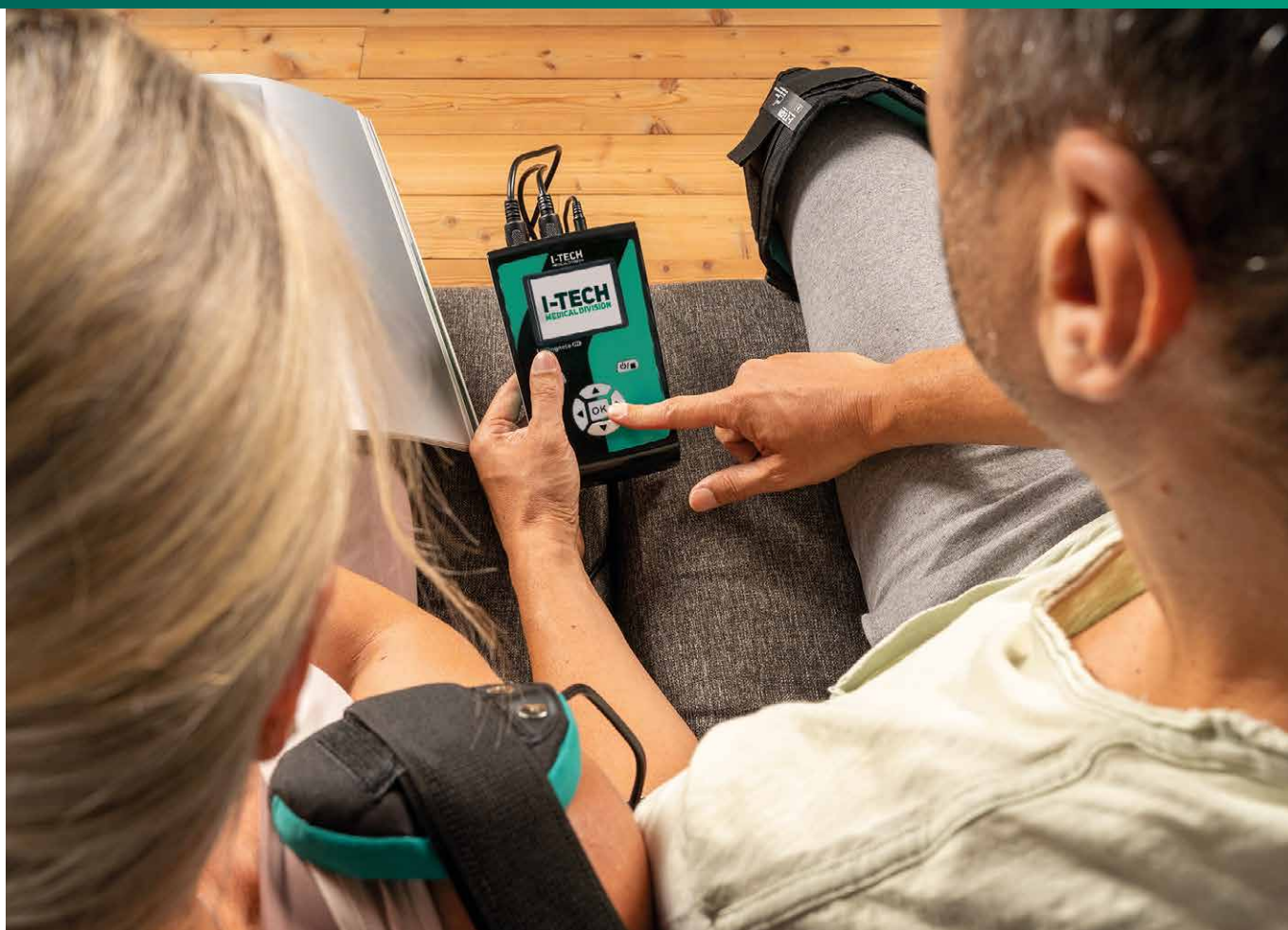

Passa a

LAMAGNETO X

Le caratteristiche de LaMagneto Pro
più il materassino Osteomat.
Per fare terapia su tutto il corpo, anche di notte.

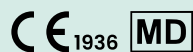

33 Neuropatia	41 Tunnel tarsale	49 Trattamento 5 Hz	57 Trattamento 50 Hz
34 Strappo muscolare	42 Notturmo 1 Hz	50 Trattamento 8 Hz	58 Trattamento 60 Hz
35 Crampo muscolare	43 Notturmo 15 Hz	51 Trattamento 10 Hz	59 Trattamento 70 Hz
36 Rizartriosi	44 Notturmo 50 Hz	52 Trattamento 15 Hz	60 Trattamento 75 Hz
37 Sindrome da impingement	45 Notturmo 75 Hz	53 Trattamento 16 Hz	61 Trattamento 80 Hz
38 Sindrome del tunnel carpale	46 Scansione automatica (Autoscan)	54 Trattamento 20 Hz	62 Trattamento 90 Hz
39 Protesi titanio	47 Trattamento 1 Hz	55 Trattamento 30 Hz	63 Trattamento 100 Hz
40 Cuffia dei rotatori	48 Trattamento 4 Hz	56 Trattamento 40 Hz	



MAG700

Il dispositivo a 1 canale per trattare le principali patologie osteoarticolari.



CE 0068

11 programmi

-

1 canale

Intensità fino a 70 gauss

Frequenza da 5 a 100 Hz

Incluso nella dotazione



F2S700

MAG2000

Da 15 anni, il dispositivo più venduto al mondo. Per te, nella sua versione originale.



CE 0068

35 programmi terapeutici preimpostati

-

2 canali

Intensità fino a 150 gauss per canale

Frequenza da 1 a 100 Hz

Incluso nella dotazione



F3S2000

PROGRAMMI (MAG700)

01 Osteoartrosi	07 Antinfiammatorio
02 Artrite	08 Scansione automatica (Autoscan)
03 Osteoporosi	09 Trattamento 5 Hz
04 Fratture	10 Trattamento 10 Hz
05 Dolori articolari	11 Trattamento 20 Hz
06 Dolori muscolari	

PROGRAMMI (MAG2000 - MAG2000 PREMIUM - MAG2000 PLUS)

01 Osteoporosi	07 Distorsioni
02 Artrosi	08 Fratture
03 Artrite	09 Epicondilita
04 Artrosi cervicale	10 Epitrocleite
05 Dolori articolari	11 Contusioni intercostali
06 Cervicalgia	12 Lombalgia

MAG2000 PREMIUM

Due fasce già incluse. Per trattare la tua patologia su più parti del corpo.



CE 0068

35 programmi terapeutici preimpostati

-

2 canali

Intensità fino a 150 gauss per canale

Frequenza da 1 a 100 Hz

Incluso nella dotazione



F3S2000

MAG2000 PLUS

Indossi il gesso? Mag2000 Plus è ideale anche per trattamenti ad altà intensità.



CE 0068

35 programmi terapeutici preimpostati

+ 10 memorie libere personalizzabili

2 canali

Intensità fino a 200 gauss per canale

Frequenza da 1 a 120 Hz

Incluso nella dotazione



F3S2000

CV2S2000

13 Dolore lombo-sacrale	19 Contratture muscolari	25 Trattamento 15 Hz	31 Trattamento 70 Hz
14 Artrosi spalla	20 Osteonecrosi	26 Trattamento 20 Hz	32 Trattamento 80 Hz
15 Artrosi ginocchio	21 Trattamento 1 Hz	27 Trattamento 30 Hz	33 Trattamento 90 Hz
16 Periartrite scapolo omerale	22 Trattamento 3 Hz	28 Trattamento 40 Hz	34 Trattamento 100 Hz
17 Coxartrosi	23 Trattamento 5 Hz	29 Trattamento 50 Hz	35 Scansione automatica (Autoscan)
18 Atrofie muscolari	24 Trattamento 10 Hz	30 Trattamento 60 Hz	



PERSONALIZZA LA TUA TERAPIA

Completa il tuo dispositivo con gli accessori adatti alle tue esigenze.

Dolore diffuso?

OSTEOMAT

Soffice, leggero, ripiegabile. Il materassino per trattamenti di lunga durata, su tutto il corpo. Anche mentre dormi.

Compatibile con LaMagneto, LaMagneto Pro, LaMagneto X, Mag2000, Mag2000 Premium, Mag2000 Plus

TRATTA TUTTO IL CORPO

grazie agli 8 solenoidi posizionati all'altezza di spalle, colonna vertebrale, bacino e ginocchia

ESTREMAMENTE SOFFICE

per fare terapia di notte, mentre dormi

LEGGERO E RIPIEGABILE

per trasportarlo dove preferisci



Disturbi articolari?

COPPIA DI SOLENOIDI CV2S2000

Massima comodità nel trattamento delle tue articolazioni, anche ad alta intensità.

Compatibile con LaMagneto, LaMagneto Pro, LaMagneto X, Mag2000, Mag2000 Premium, Mag2000 Plus



FASCIA TERAPEUTICA F3S2000

Fascia elastica terapeutica per magnetoterapia a bassa frequenza con cavo a 3 solenoidi.

Compatibile con serie LaMagneto, Mag2000, Mag2000 Premium, Mag2000 Plus.



FASCIA TERAPEUTICA F2S700

Fascia elastica terapeutica per magnetoterapia a bassa frequenza con cavo a 2 solenoidi.

Compatibile con Mag700.



TAP2000

Il tappetino 40x40cm a 6 solenoidi, ideale per i tuoi trattamenti alla schiena.

Compatibile con serie LaMagneto, Mag2000, Mag2000 Premium, Mag2000 Plus.



CIL-MAG

Il solenoide cilindrico professionale che ti permette di trattare comodamente gli arti inferiori.

Compatibile con Mag2000, Mag2000 Premium, Mag2000 Plus.



ORTHOMAG

Sei sempre in movimento?

Con Orthomag fai terapia ovunque vuoi, in totale libertà.

PORTATILE, CON BATTERIA RICARICABILE

per fare terapia dove vuoi,
quando vuoi



**INTENSITÀ
FINO A 25 GAUSS**

APPLICATORE FLESSIBILE



CE 0068

Incluso nella dotazione



TRATTAMENTI

PROGRAMMA L (50 HZ)

Algodistrofie
Gonartrosi
Degenerazione cartilaginea
Fratture
Lesione cartilaginea
Osteoartrosi
Osteonecrosi
Osteoporosi
Ritardi di calcificazione
Pseudoartrosi

PROGRAMMA H (75 HZ)

Aderenze cicatriziali	Epicondilite
Artrite	Epitrocite
Artrosi	Ernia del disco
Borsite	Fascite plantare
Brachialgia	Lombalgia
Capsulite	Meniscopatia
Cervicalgia	Metatarsalgia
Colpo di frusta	Periartrite
Condropatia	Pubalgia
Contusioni	Reumatismi
Coxartrosi	Rizartrosi
Dolori articolari in genere	Sciatalgia
Dolori reumatici	Stati infiammatori in genere
Dorsalgia	Strappi muscolari



MAG1000

Il dispositivo per magnetoterapia ad alta frequenza per trattare prevalentemente patologie muscolari o tendinee.

20 PROGRAMMI PREIMPOSTATI

per rendere semplicissima la tua terapia

2 CANALI

3 LIVELLI DI INTENSITÀ regolabili



FREQUENZA 27 MHZ

MODULAZIONE DA 8 A 640 HZ

Incluso nella dotazione



FTI1000-2018

Aggiungi TAP-HF!

Il tappetino 40x40cm per magnetoterapia ad alta frequenza.



CE 0068

CE MD

PROGRAMMI

01 Artrite / Artrosi

06 Osteoporosi

11 Contusioni

16 Epitrocleite

02 Reumatismi

07 Fratture

12 Mialgie

17 Lombalgia

03 Dolori / Protesi articolari

08 Distorsioni

13 Tendiniti

18 Contratture muscolari

04 Ernia discale

09 Lussazioni

14 Ematomi

19 Applicazione media 2h

05 Dolori muscolari

10 Traumi


15 Epicondilita

20 Applicazione lunga 4h

Ottieni il massimo dalla tua terapia.



PROGRAMMA LE
TUE SEDUTE

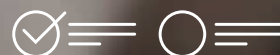

REGISTRA I TUOI
PROGRESSI



ACCEDI A
CONTENUTI ESCLUSIVI

Scarica
la nostra nuova app
e inizia il tuo percorso
terapeutico.

I-TECH
Life

Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play

INDICAZIONI TERAPEUTICHE

EDEMA

LINFEDEMA

ULCERE VENOSE

INSUFFICIENZA VENOSA

RECUPERO MUSCOLARE



PRESSOTERAPIA

Gambe gonfie o rigide?

La pressoterapia ti aiuterà a ridurre il gonfiore, la rigidità degli arti e a rimuovere le tossine.

Promuove, inoltre, il corretto ritorno venoso e linfatico di braccia e gambe.

DURATA DEL TRATTAMENTO CONSIGLIATA



Da 20 a 60
minuti al giorno




30 giorni

COME FUNZIONA?

La pressoterapia esercita una compressione sequenziale su arti e addome con un movimento disto-proximale, cioè dalla periferia verso il centro del corpo. Questa azione favorisce la movimentazione del sangue e della linfa in presenza di ristagni o difficoltà di circolazione.

I-PRESS

I-Press ti aiuta a migliorare la circolazione venosa e linfatica degli arti e a trattare alcune patologie dell'apparato circolatorio.

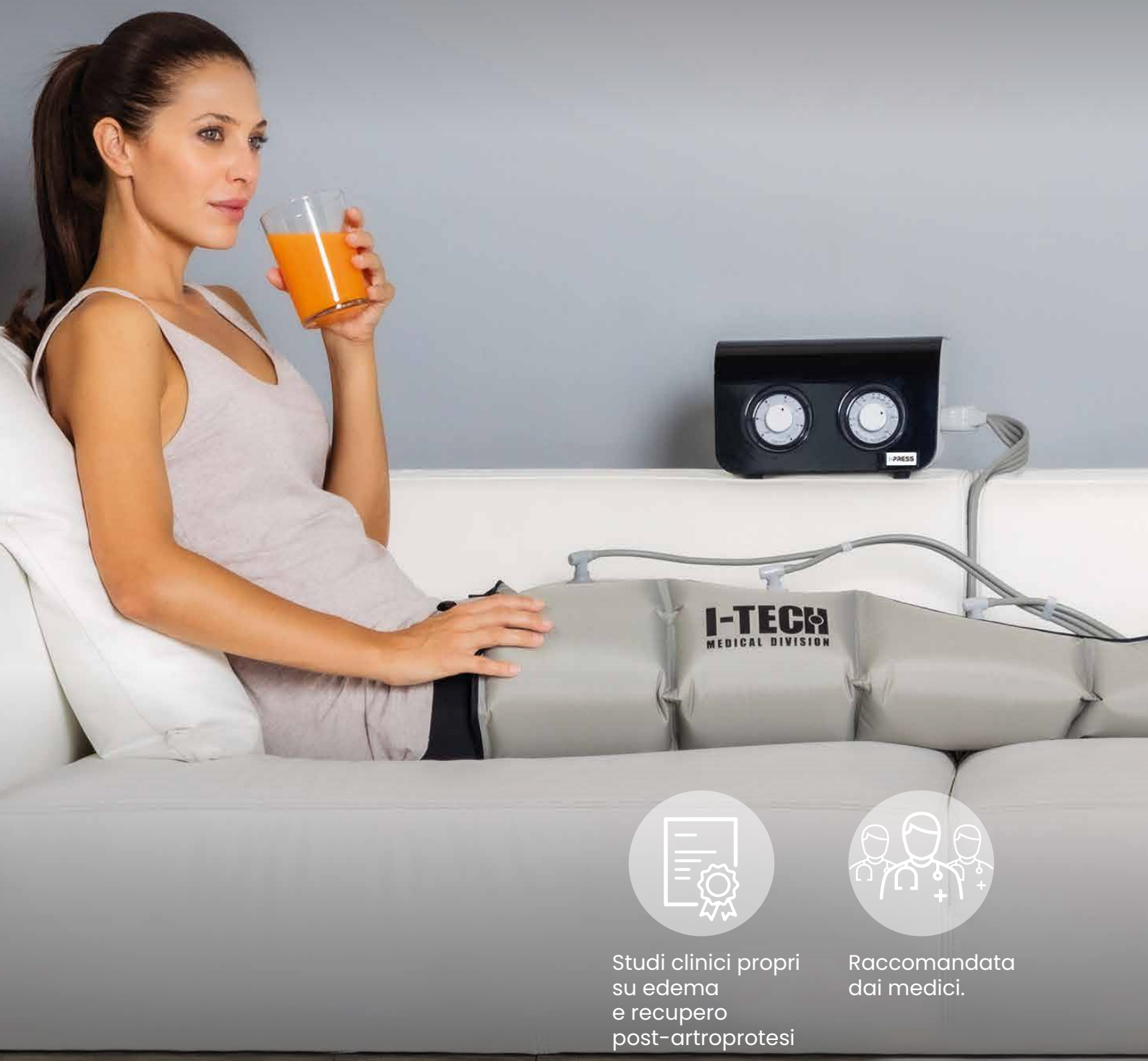

**I-TECH
MEDICAL DIVISION**



Studi clinici propri
su edema
e recupero
post-artroprotesi



Raccomandata
dai medici.

4 CAMERE DI COMPRESSIONE

che si gonfiano in sequenza,
dal piede alla coscia

SCEGLI CONFIGURAZIONE E ACCESSORI

personalizza il trattamento come desideri

FACILE E INTUITIVA

imposta durata
della seduta e
pressione e sei già
pronto per la terapia



**ANCHE IN
COMODE RATE
MENSILI**

CE 1936

CONFIGURAZIONI

I-Press LEG1

Corpo macchina
1 gambale
Tubo a 4 terminazioni
1 plantare pressore



I-Press LEG2

Corpo macchina
2 gambali
Tubo a 8 terminazioni
2 plantari pressori



I-Press ARM1

Corpo macchina
1 bracciale
Tubo a 4 terminazioni



Tutte e 3 le configurazioni possono essere personalizzate ulteriormente con tutta la gamma di accessori per la pressoterapia.

TRATTAMENTI

	Pressione (mmHg)	Tempo (minuti)
Edema	50	50
Linfedema	50	30
Ulcere venose	50	60
Insufficienza venosa	50	60
Recupero muscolare	85	20



GAMBALI

Gambali a 4 camere

GAMBALE

CIRCONFERENZA COSCIA

CIRCONFERENZA CAVIGLIA

LUNGHEZZA GAMBA

(misura presa dall'interno coscia al tallone)

ESTENSORI


Coppia di estensori per gambali

TAGLIA (M)




Fino a 60 cm
Fino a 33 cm
Fino a 76 cm

TAGLIA (L)

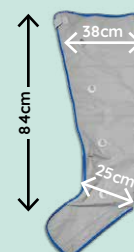

Fino a 72 cm
Fino a 46 cm
Fino a 84 cm

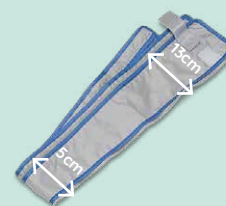

PROTEZIONI IN TNT

Coppia di protezioni igieniche in TNT per gambali



BRACCIALE

Bracciale a 4 camere


BRACCIALE

CIRCONFERENZA ASCELLA

CIRCONFERENZA POLSO

LUNGHEZZA BRACCIO

(misura presa dall'ascella al polso)

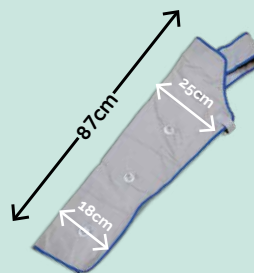

Fino a 46 cm
Fino a 32 cm
Fino a 87 cm

ESTENSORE

Estensore per bracciale



Fino a 59 cm
Fino a 37 cm
Fino a 87 cm

CIRCONFERENZA ASCELLA
(bracciale + estensore)

CIRCONFERENZA POLSO
(bracciale + estensore)

LUNGHEZZA BRACCIO
(misura presa dall'ascella al polso)

FASCIA ADDOMINALE

Fascia addominale
a 4 camere


CIRCONFERENZA VITA

TAGLIA (M)



Fino a 116 cm

TAGLIA (L)

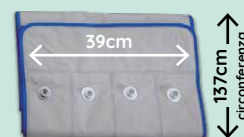

Da 117 cm a 132 cm

Le foto degli accessori sono puramente illustrative, il prodotto potrebbe riportare delle variazioni in alcuni dettagli estetici.

ACCESSORI

CONNETTORE DOPPIO

Connettore a 4 tubi e 8 terminazioni per terapia simultanea.
(2 gambali o 2 bracciali)



CONNETTORE SINGOLO

Connettore a 4 tubi per bracciale, gambale o fascia addominale.



ADATTATORE PER DOPPIA TERAPIA

Adattatore per terapia simultanea.
(2 gambali e fascia addominale)



Le foto degli accessori sono puramente illustrative, il prodotto potrebbe riportare delle variazioni in alcuni dettagli estetici.

INDICAZIONI TERAPEUTICHE

RECUPERO MUSCOLARE

RIDUZIONE DEL DOLORE

TRATTAMENTO DELL'INCONTINENZA

**TRATTAMENTO DEL MUSCOLO
DENERVATO**

IONOFORESI



ELETTROTERAPIA

Recupera più velocemente,
riducendo il dolore.

L'elettroterapia trasmette micro-impulsi al corpo umano, diversi in frequenza, larghezza di impulso e intensità, a seconda del trattamento da effettuare.

DURATA DEL TRATTAMENTO CONSIGLIATA



Per conoscere la durata della terapia, ti consigliamo di consultare il tuo medico e di attenerti alle indicazioni presenti nel nostro manuale d'uso.

MIO-CARE TENS

Riduci il dolore rapidamente.
Sia in caso di dolore cronico, che acuto.



CE 0068

20 programmi TENS

-

-

2 canali indipendenti

Onda quadra bifasica compensata

Clip aggancio cintura

Intensità massima: 100mA

Batteria interna Ni-Mh ricaricabile

MIO-CARE FITNESS

Trova sollievo dal dolore, riduci gli inestetismi e
rafforza i tuoi muscoli. Tutto con Mio-Care Fitness.



CE 0068

20 programmi TENS

20 programmi FITNESS

15 programmi BEAUTY

2 canali indipendenti


Onda quadra bifasica compensata

Clip aggancio cintura


Intensità massima: 100mA

Batteria interna Ni-Mh ricaricabile

Incluso nella dotazione

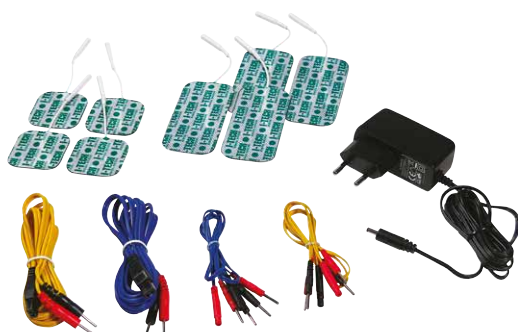

Incluso nella dotazione

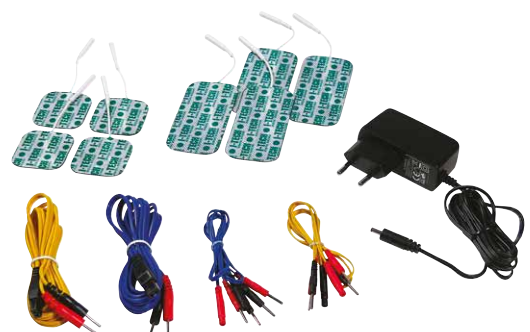

PROGRAMMI

TENS

(MIO-CARE TENS E MIO-CARE FITNESS)

- 01 Tens convenzionale (rapido)
- 02 Tens endorfinico (ritardato)
- 03 Tens ai valori massimi
- 04 Antinfiammatorio
- 05 Cervicalgia / Cefalea miotensiva
- 06 Lombalgia / Sciatalgia
- 07 Distorsioni / Contusioni
- 08 Vascolarizzazione
- 09 Rilassamento muscolare
- 10 Ematomi
- 11 Prevenzione atrofia
- 12 Atrofia (recupero trofismo)
- 13 Dolori mano e polso
- 14 Stimolazione plantare
- 15 Epicondilitis
- 16 Epitrocleite
- 17 Periartrite
- 18 Microcorrente
- 19 Incontinenza da sforzo*
- 20 Incontinenza da urgenza*

*Sonde non incluse

FITNESS

(MIO-CARE FITNESS)

- 01 Riscaldamento
- 02 Resistenza arti superiori e tronco
- 03 Resistenza arti inferiori
- 04 Forza resistente arti superiori e tronco
- 05 Forza resistente arti inferiori
- 06 Forza base arti superiori e tronco
- 07 Forza base arti inferiori
- 08 Forza veloce arti superiori e tronco
- 09 Forza veloce arti inferiori
- 10 Forza esplosiva arti superiori e tronco
- 11 Forza esplosiva arti inferiori
- 12 Capillarizzazione profonda
- 13 Recupero muscolare
- 14 Agonista-antagonista
- 15 Contrazioni toniche sequenziali arti superiori e tronco
- 16 Contrazioni toniche sequenziali arti inferiori
- 17 Contrazioni fasiche sequenziali arti superiori e tronco
- 18 Contrazioni fasiche sequenziali arti inferiori
- 19 Decontratturante
- 20 Massaggio profondo

BEAUTY

(MIO-CARE FITNESS)

- 01 Rassodamento arti superiori e tronco
- 02 Rassodamento arti inferiori
- 03 Tonificazione arti superiori e tronco
- 04 Tonificazione arti inferiori
- 05 Definizione arti superiori e tronco
- 06 Definizioni arti inferiori
- 07 Modellamento
- 08 Microlifting
- 09 Lipolisi addome
- 10 Lipolisi cosce
- 11 Lipolisi glutei e fianchi
- 12 Lipolisi braccia
- 13 Elasticità tessuti
- 14 Capillarizzazione
- 15 Pesantezza alle gambe

Vuoi il top?

Passa a

I-TECH PHYSIO

L'elettrostimolatore facile da usare e completamente programmabile per la terapia del dolore e la riabilitazione muscolare.

Scopriilo a pagina 30



MIO-CARE PRO

Rafforza i tuoi muscoli, dopo un intervento o per prepararti alle gare.

2 CANALI INDIPENDENTI

facilmente programmabili

2 TIPI DI ONDA QUADRA

bifasica compensata e monofasica

CLIP DI AGGANCIO ALLA CINTURA


per una maggiore comodità

INTENSITÀ MASSIMA 100 mA

BATTERIA INTERNA Ni-Mh ricaricabile



Incluso nella dotazione

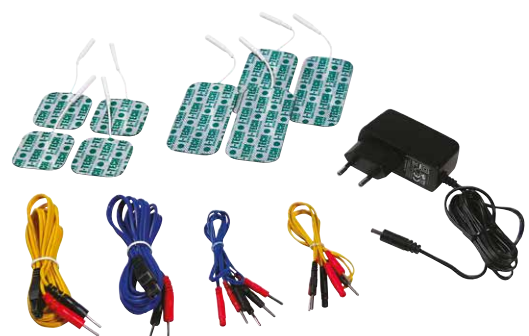



PROGRAMMI

TENS

01 Tens rapido
02 Tens endorfinico
03 Tens ai valori massimi
04 Antinfiammatorio
05 Cervicalgia / Cefalea miotensiva
06 Lombalgia / Sciatalgia
07 Distorsioni / Contusioni
08 Vascolarizzazione
09 Rilassamento muscolare o Decontratturante
10 Dolori mano e polso
11 Stimolazione plantare
12 Epicondilita
13 Epitrocleite
14 Periartrite

NEMS

01 Riscaldamento
02 Resistenza arti superiori e tronco
03 Resistenza arti inferiori
04 Forza resistente arti superiori e tronco
05 Forza resistente arti inferiori
06 Forza base arti superiori e tronco
07 Forza base arti inferiori
08 Forza veloce arti superiori e tronco
09 Forza veloce arti inferiori
10 Forza esplosiva arti superiori e tronco
11 Forza esplosiva arti inferiori
12 Capillarizzazione profonda
13 Recupero muscolare
14 Agonista-antagonista
15 Contrazioni toniche sequenziali arti superiori e tronco
16 Contrazioni toniche sequenziali arti inferiori
17 Contrazioni fasiche sequenziali arti superiori e tronco
18 Contrazioni fasiche sequenziali arti inferiori
19 Decontratturante
20 Massaggio profondo
21 EMS

BEAUTY

01 Rassodamento arti superiori e tronco
02 Rassodamento arti inferiori
03 Tonificazione arti superiori e tronco
04 Tonificazione arti inferiori
05 Definizione arti superiori e tronco
06 Definizioni arti inferiori
07 Modellamento
08 Microlifting
09 Lipolisi addome
10 Lipolisi cosce
11 Lipolisi glutei e fianchi
12 Lipolisi braccia
13 Elasticità tessuti
14 Capillarizzazione
15 Pesantezza alle gambe

MEMORIE LIBERE

01 TENS Mem1
02 TENS Mem2
03 TENS Mem3
04 TENS Mem4
05 TENS Mem5
06 NEMS Mem1
07 NEMS Mem2
08 NEMS Mem3
09 NEMS Mem4
10 NEMS Mem5
11 NEMS Alternato
12 NEMS Alternato
13 Test batteria

I-TECH PHYSIO

Il dispositivo completo e programmabile per trattare il dolore e riabilitare i tuoi muscoli.



Raccomandato
dai medici.

PROGRAMMI

TENS

- 01 Tens rapido
- 02 Tens endorfinico
- 03 Tens ai valori massimi
- 04 Antinfiammatorio
- 05 Cervicalgia/Cefalea miotensiva
- 06 Lombalgia/Sciatalgia
- 07 Distorsioni/Contusioni
- 08 Vascolarizzazione
- 09 Decontratturante
- 10 Dolori mano e polso
- 11 Stimolazione plantare
- 12 Epicondilita
- 13 Epitrocite
- 14 Periartrite

REHA

- 01 Ionoforesi L
- 02 Ionoforesi M
- 03 Ionoforesi H
- 04 Microcorrente
- 05 Ematoma
- 06 Edema
- 07 Tens modulata
- 08 Tens Burst
- 09 Prevenzione atrofia
- 10 Atrofia
- 11 Denervato quadra 50 ms
- 12 Denervato quadra 100 ms
- 13 Denervato quadra 150 ms
- 14 Denervato quadra 200 ms
- 15 Denervato quadra 250 ms
- 16 Denervato triangolare 50 ms
- 17 Denervato triangolare 100 ms
- 18 Denervato triangolare 150 ms
- 19 Denervato triangolare 200 ms
- 20 Denervato triangolare 250 ms
- 21 Interferenziale
- 22 Tens con modulazione in ampiezza
- 23 Tens alternata
- 24 Tens con modulazione in frequenza 1
- 25 Tens con modulazione in frequenza 2
- 26 Tens con modulazione in ampiezza
- 27 Kotz


2 CANALI INDIPENDENTI

facilmente programmabili

INCLUDE TRATTAMENTI PER MUSCOLO DENERVATO, IONOFORESI E INCONTINENZA

ONDA INTERFERENZIALE E KOTZ

oltre alle più classiche
quadra bifasica compensata,
quadra monofasica
e triangolare

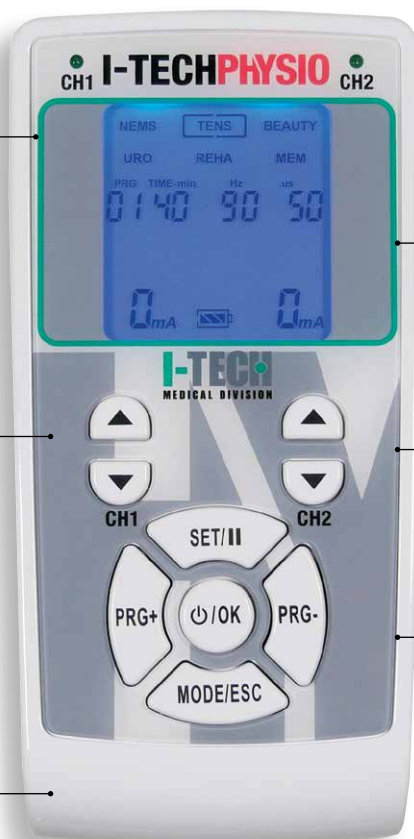

I-TECH
Life

Collegabile all'APP

CLIP DI AGGANCIO ALLA CINTURA

per una maggiore
comodità

INTENSITÀ MASSIMA 100 mA

BATTERIA INTERNA Ni-Mh ricaricabile

Incluso nella dotazione



Possibilità di aggiunta

Sonda anale
Sonda vaginale



NEMS

01 Riscaldamento	16 Contrazioni toniche sequenziali arti inferiori
02 Resistenza arti superiori e tronco	17 Contrazioni fasiche sequenziali arti superiori e tronco
03 Resistenza arti inferiori	18 Contrazioni fasiche sequenziali arti inferiori
04 Forza resistente arti superiori e tronco	19 Decontratturante
05 Forza resistente arti inferiori	20 Massaggio profondo
06 Forza base arti superiori e tronco	21 EMS
07 Forza base arti inferiori	
08 Forza veloce arti superiori e tronco	
09 Forza veloce arti inferiori	
10 Forza esplosiva arti superiori e tronco	
11 Forza esplosiva arti inferiori	
12 Capillarizzazione profonda	
13 Recupero muscolare	
14 Agonista-antagonista	
15 Contrazioni toniche sequenziali arti superiori e tronco	

BEAUTY

01 Rassodamento arti superiori e tronco
02 Rassodamento arti inferiori
03 Tonificazione arti superiori e tronco
04 Tonificazione arti inferiori
05 Definizione arti superiori e tronco
06 Definizioni arti inferiori
07 Modellamento
08 Microlifting
09 Lipolisi addome
10 Lipolisi cosce
11 Lipolisi glutei e fianchi
12 Lipolisi braccia
13 Elasticità tessuti
14 Capillarizzazione
15 Pesantezza alle gambe

INCONTINENZA

01 Incontinenza da stress*
02 Incontinenza da stress*
03 Incontinenza da stress*
04 Incontinenza da urgenza*
05 Incontinenza da urgenza*
06 Incontinenza da urgenza*
07 Incontinenza mista*
08 Incontinenza mista*
09 Incontinenza mista*

*Sonde non incluse

+ 13 MEMORIE LIBERE





I-TECH
Life

Collegabili all'APP

SCOPRI LA GAMMA T-ONE

T-One è la nostra gamma di elettrostimolatori a **4 canali**.



T-ONE COACH

Tonifica e rafforza i tuoi muscoli, trova sollievo dal dolore e recupera da traumi e infortuni.



CE 0068

-
16 programmi TENS
14 programmi NEMS
18 programmi BEAUTY
-
10 programmi doppio utente (2+2)
-
-
4 canali indipendenti (fino a 8 elettrodi)
Intensità regolabile da 1 a 120 mA
Frequenza onda da 1 a 150 Hz
Larghezza impulso da 20 a 300 µs
Tempo preimpostato per ciascun programma
Onda quadra bifasica compensata
-
-
-
-

T-ONE MEDI SPORT

Migliora le tue performance: prima e dopo gli allenamenti, o per recuperare da un infortunio.



CE 0068

10 programmi REHA
16 programmi TENS
20 programmi NEMS
18 programmi BEAUTY
-
22 programmi doppio utente (2+2)
12 memorie libere TENS/NEMS
Include trattamenti di ionofresi
4 canali indipendenti (fino a 8 elettrodi)
Intensità regolabile da 1 a 120 mA
Frequenza onda da 1 a 1200 Hz
Larghezza impulso da 20 a 450 µs
Tempo da 1 a 90 minuti
Onda quadra bifasica compensata
Onda monofasica (solo per programmi di ionofresi)
-
-
-

Tutti i modelli T-One dispongono di una batteria interna Ni-Mh ricaricabile.

Incluso nella dotazione



Incluso nella dotazione



T-ONE MEDI PRO

Il supporto ideale per te che sei un atleta professionista o lavori con team sportivi.

Dispositivo usato in studio clinico
in collaborazione con l'Agenzia Spaziale Tedesca.



CE 0068

16 programmi REHA
16 programmi TENS
20 programmi NEMS
18 programmi BEAUTY
9 programmi URO
22 programmi doppio utente (2+2)
12 memorie libere TENS/NEMS
Include trattamenti per muscolo denervato e ionoforesi
4 canali indipendenti (fino a 8 elettrodi)
Intensità regolabile da 1 a 120 mA
Frequenza onda da 0,2 a 1200 Hz
Larghezza impulso da 20 µs a 300 ms
Tempo da 1 a 90 minuti
Onda quadra bifasica compensata
Onda monofasica (solo per programmi di ionoforesi)
-
-
-

T-ONE REHAB

Il dispositivo più completo per te che sei uno specialista dello sport e della riabilitazione.

Studi clinici post-artroprotesi e pazienti Covid.



CE 0068

29 Programmi REHA
16 Programmi TENS
20 Programmi NEMS
18 Programmi BEAUTY
9 Programmi URO
22 Programmi doppio utente (2+2)
12 Memorie libere TENS/NEMS
Include trattamenti per muscolo denervato e ionoforesi
4 canali indipendenti (fino a 8 elettrodi)
Intensità regolabile da 1 a 120 mA
Frequenza onda da 0,2 a 1200 Hz
Larghezza impulso da 20 µs a 300 ms
Tempo da 1 a 90 minuti
Onda quadra bifasica compensata
Onda monofasica (solo per programmi di ionoforesi)
Onda triangolare
Onda interferenziale
Onda di Kotz

Tutti i modelli T-One dispongono di una batteria interna Ni-Mh ricaricabile.

Incluso nella dotazione




Incluso nella dotazione



ELJ41X414 / ELJ48X484 MD

4 elettrodi adesivi
pregellati con attacco
jack 2mm.
Misure: 41x41mm
48x48mm

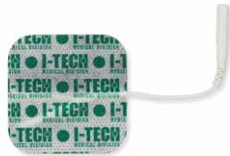

CE

ELJ40X804 / ELJ50X904 MD


4 elettrodi adesivi
pregellati con attacco
jack 2mm.
Misure: 40x80mm
50x90mm



CE

OVAL03 MD

2 elettrodi adesivi pregellati
130x76 mm
con attacco jack 2mm.

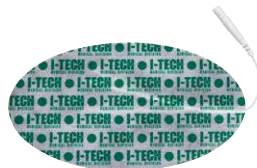

CE

ELJ30R4 MD

4 elettrodi da viso
adesivi pregellati 30mm
con attacco jack 2mm.



CE

ELB46X474 MD

4 elettrodi adesivi pregellati
46x47mm
con attacco a bottone.



CE

ELB53X964 MD

4 elettrodi adesivi pregellati
53x96mm
con attacco a bottone.



CE

ELADCL8F

4 adattatori per cavi con
spina maschio 2mm e
elettrodo/fascia
con attacco a bottone.



FP235-245

FC250-265 MD

4 fasce elastiche conduttive per cosce
2x65cm + 2x50cm e per polpacci 2x35cm
+ 2x45cm regolabili con attacco a bottone.

CE



FI80X60 MD

Fascia elastica 8x60 cm
blu per ionoforesi.

CE



ELB60X801 / ELB80X1201 MD

Elettrodo per ionoforesi in pelle
di daino con attacco a bottone.
Misure: 60x80mm
80x120mm



CE

ELG60X852 / ELG80X1202 MD

2 elettrodi in gomma
con attacco jack 2mm.
Misure: 60x85mm / 80x120mm



CE

Le foto degli accessori sono puramente illustrative, il prodotto potrebbe riportare delle variazioni in alcuni dettagli estetici.

SPX60X852/SPX80X1202 MD

2 spugne per elettrodi in gomma con attacco jack 2mm.
Misure: 60x85mm / 80x120mm




IPP-PAD MD

Elettrodo per ionoforesi specifico per trattamento IPP (Induratio Penis Plastica).



SA2S/BEAC

Sonda anale
Beac con
attacco jack 2mm.

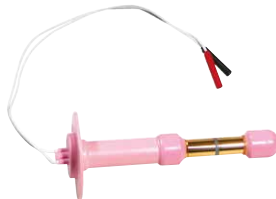

Dispositivo conforme alla direttiva 93/42/CEE

SV2S/BEAC

Sonda vaginale
Beac con
attacco jack 2mm.



Dispositivo conforme alla direttiva 93/42/CEE

GE000250 MD

Gel 260ml per
ultrasuonoterapia
e elettroterapia.



HANDY TRODE

Manipolo/Elettrodo
bipolare per applica-
zioni viso/décolté/
seno con presa 2mm.



PEN-EL

Penna cerca punti
con presa 2mm.



CV025318

Cavo blu e giallo per
serie Mio-Care con
terminale 2mm.



TWINJ2X2

Cavetti sdoppiatore
2 gialli e 2 blu
con terminale 2mm.



MIO-BATTERY NEW

Batteria ricaricabile
serie Mio-Care e
Mag1000 (2012).



UNICHAR

Carica batteria
Mio-Care Tens/
Beauty/Fitness
e Mag1000 (2012).




UNICHAR NEW

Carica batteria (6,8Vdc)
serie T-One, Mag1000
(2018), Mio-Vein,
Mio-Care Pro, Mio-Ionotens
e I-Tech Physio.



T-ONE BATTERY

Batteria ricaricabile
serie T-One 2016,
4,8V Ni-Mh 2300mA.
Anche per Mag1000
(2018)

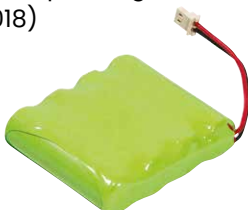

CJ025317 / CJ025314 / CJ025312 / CJ025315

Cavo blu, giallo, rosso, bianco serie T-One con terminale 2mm.
Venduti singolarmente.



Le foto degli accessori sono puramente illustrative, il prodotto potrebbe riportare delle variazioni in alcuni dettagli estetici.

INDICAZIONI TERAPEUTICHE

DOLORE MIOFASZIALE

DOLORE MUSCOLARE

TUNNEL CARPALE

ULCERE VENOSE

ULCERE DA PRESSIONE

DOLORE LOMBARE

ARTROSI

EPICONDILITE

EPITROCLEITE

TENDINITE

TUNNEL CUBITALE

STENOSI LOMBARE

SCIATALGIA



ULTRASUONOTERAPIA

Con gli ultrasuoni potrai trovare sollievo dal dolore in poche sedute.

Trasferendo energia ai tessuti del nostro corpo, promuovono la microcircolazione e aiutano a eliminare correttamente i liquidi sottocutanei in eccesso.

DURATA DEL TRATTAMENTO CONSIGLIATA



Da 5 a 15 minuti
al giorno.



10 giorni.
Eventualmente
ripetibile.

POWERSONIC

Fai terapia dove vuoi, quando vuoi.
E riduci dolore e infiammazioni
in poche sedute.



Raccomandato
dai medici.



L'UNICO A BATTERIA
tra i dispositivi medici CE
a ultrasuoni

**INTENSITÀ MASSIMA
1,6 W/CM²**
collegato alla presa
di corrente

**ULTRASUONO
DA 1 MHZ**
come un trattamento
professionale
ma a casa tua

**DURATA
E INTENSITÀ REGOLABILI**
per 9 diverse combinazioni



CE 0068

TRATTAMENTI

Dolore miofasciale	Ulcere da pressione	Epitrocleite	Sciatalgia
Dolore muscolare	Dolore lombare	Tendinite	
Tunnel carpale	Artrosi	Tunnel cubitale	
Ulcere venose	Epicondilite	Stenosi lombare	



MIO-SONIC

Riduci dolore e contratture, con la compattezza di Mio-Sonic.
Efficace anche nel trattamento di inestetismi.

**FASCIO ULTRASONICO
COLLIMATO**

**INTENSITÀ MASSIMA
1,6 W/CM²**

**DURATA E INTENSITÀ
REGOLABILI**
per 9 diverse combinazioni

**ULTRASUONO
DA 1 MHZ**

CE 0068

PROGRAMMI

9 combinazioni di durata e intensità, impostabili per eseguire 20 programmi per trattamenti antalgici e decontratturanti e 29 programmi per trattamenti estetici.



Scopri la guida all'ultrasuonoterapia



Leggila qui.

www.itechmedicaldivision.com/ultrasuonoterapia-a-cosa-serve/

DIAGNOSTICA

Monitora i tuoi parametri vitali con i pulsossimetri e il termometro digitale di I-Tech Medical Division.

Saturimetro FOX-200

- Display LED
- Indicazione SpO2, battito cardiaco, barra delle pulsazioni
- Autospegnimento quando il dito non è inserito
- Indicazione di batteria in esaurimento
- Si adatta alle dimensioni del dito di adulti e bambini

NO NEONATI



CE 0482

Saturimetro FOX-300

- Display OLED a 2 colori
- Indicazione SpO2, battito cardiaco, barra delle pulsazioni, indice di perfusione, pletismogramma
- Autospegnimento quando il dito non è inserito
- Indicazione di batteria in esaurimento
- Si adatta alle dimensioni del dito di adulti e bambini

NO NEONATI



CE 0123

Termometro digitale a infrarossi FI06

- Display LCD retroilluminato a 3 colori
- Indicatore di allarme febbre
- Lettura istantanea
- Misurazione accurata
- Misurazione frontale in gradi °C/°F
- Memoria disponibile



CE 0197

PRODOTTI PROFESSIONALI

I-Tech Medical Division anche nel tuo studio!
Scopri i nostri dispositivi ad uso ambulatoriale
per professionisti della salute.

Diatermia

La diatermia, più conosciuta come Tecar terapia (acronimo di Trasferimento Energetico Capacitivo e Resistivo), si posiziona come una delle tecniche terapeutiche più potenti che attualmente esistono nel mercato.

La diatermia, infatti, trasferisce al corpo umano la più grande quantità di energia per unità di tempo.

Generando calore direttamente all'interno dei tessuti, accelera i processi metabolici e quelli di recupero.

Ciò permette di ottenere risultati eccellenti in poco tempo, nel trattamento di patologie sia acute, sia croniche. Un gran beneficio tanto per il paziente, quanto per il fisioterapista.

[Scopri la a pagina 46](#)

Laserterapia

La laserterapia si basa su effetti fotochimici e fotobiologici nelle cellule e nei tessuti.

La sua applicazione produce infatti una serie di risposte da parte dell'organismo, tra cui: aumento del flusso ematico, biostimolazione, effetto antinfiammatorio, anti-edematoso e analgesico. Questa terapia è in grado di agire su numerose patologie acute e croniche, alleviando il dolore, riducendo le infiammazioni e accelerando il recupero.

[Scopri il nostro laser a pagina 48](#)

Ultrasuonoterapia professionale

Gli ultrasuoni sono ideali per il trattamento di patologie a livello muscolare e nervoso, per il recupero di traumi, in caso di patologie sia croniche che acute.

Sono indicati anche per applicazioni in ambito estetico, come per il trattamento della cellulite, la rigenerazione dei tessuti, la vascolarizzazione e il drenaggio linfatico.

E se un dispositivo a ultrasuoni avesse anche un modulo dedicato all'elettroterapia?

[Scopri i nostri prodotti ad uso ambulatoriale a pagina 48](#)

REATHERM

La diatermia con effetto di neuromodulazione: efficace, sicura, precisa. Risultati ottimali già dalla prima seduta. Che si tratti di riabilitazione, sport, estetica.



PROGRAMMI

REHAB

01 Arto fantasma	11 Disfunzioni ATM	21 LCA
02 Artrosi ginocchio	12 Distorsione	22 Linfedema
03 Artrosinovite	13 Distrazione muscolare	23 Lombalgia
04 Borsite	14 Dolori articolari	24 Lombosciatalgia
05 Cervicalgia	15 Edema	25 Meniscopatia (sinovite meniscale)
06 Colpo frusta	16 Entesite	26 Piede diabetico
07 Condropatia	17 Epicondilita	27 Sindrome del piriforme
08 Contrattura muscolare	18 Epitrocleite	28 Strappo muscolare
09 Contusione	19 Ernia del disco	29 Tendinite acuta
10 Stiramento muscolare	20 Esiti cicatriziali	30 Tendinite cronica

MODULAZIONE 1 ÷ 100 HZ

Trattamenti confortevoli, anche in atermia, effetto di neuromodulazione. Da non confondere col classico duty-cycle.

401 FREQUENZE (300 ÷ 700 KHZ)

per adattare il trattamento alle esigenze del singolo paziente

10 MEMORIE LIBERE MODALITÀ CUSTOM

trattamento personalizzato, fino a 60 minuti

MANIPOLI MONOPOLARI E BIPOLARI

ergonomici

50 PROGRAMMI PREIMPOSTATI

per una vera guida ai trattamenti

FORMAZIONE PROFESSIONALE INCLUSA

LEGGERA, POTENTE, TRASPORTABILE

3 kg, 200W

Incluso nella dotazione



Aggiungi Troll-M!

Carrello a 3 ripiani con 4 ruote girevoli e 1 presa di alimentazione.



CE 0068

SPORT

- 31 Tendinopatia cuffia rotatori
- 32 Ulcera
- 33 Versamento
- 34 Artroprotesi (recupero)
- 35 Fratture

- 01 Contrattura muscolare

- 02 Contusione

- 03 Defaticamento muscolare

- 04 Distorsione

- 05 Ematoma

- 06 Lesione tendinea

- 07 Massaggio superficiale

- 08 Massaggio profondo

- 09 Stiramento muscolare

- 10 Strappo muscolare

BEAUTY

- 01 Cellulite

- 02 Collagene

- 03 Edema

- 04 Massaggio drenante

- 05 Microlifting

+ 10 MEMORIE LIBERE

LA500

Un rapido intervento nel trattamento di infiammazioni e patologie degenerative in ambito ortopedico, neurologico e dermatologico.



Incluso nella dotazione



CE 0068

I-TECH UT²

Doppio manipolo (5 cm² e 1 cm²) e possibilità di scelta della frequenza di lavoro (1-3 MHz) per adattare il trattamento alle esigenze terapeutiche del paziente.



Incluso nella dotazione



Aggiungi Troll-M!
Carrello a 3 ripiani con 4 ruote girevoli e 1 presa di alimentazione.



CE 0068

I-TECH UE

Un dispositivo completo. Ultrasuonoterapia, elettroterapia con possibilità di combinare le due terapie per benefici ancora maggiori.



Incluso nella dotazione



Aggiungi Troll-M!
Carrello a 3 ripiani con 4 ruote girevoli e 1 presa di alimentazione.



CE 0068



**Inizia a
stare bene oggi.**

**Puoi pagare
anche domani.**

Ora puoi acquistare i nostri dispositivi
in comode **rate mensili**.
E inizi a pagare 30 giorni dopo l'acquisto.

Scopri di più: www.itechmedicaldivision.com/finanziamento



A woman with dark hair in a ponytail, wearing a white t-shirt and black shorts, is sitting on a grey couch. She is holding a smartphone in her right hand, which is connected to a small, white and teal medical device. A black strap with sensors is wrapped around her left knee, connected to the device by a black cable. The background shows a window with greenery outside.

Detrai il tuo dispositivo

Quando acquisti un dispositivo medico I-Tech Medical Division, hai diritto a una **detrazione di imposta del 19%** sulla spesa sostenuta, al momento della dichiarazione dei redditi.

Il diritto a tale detrazione è legato alla certificazione dei nostri dispositivi e non richiede alcuna prescrizione medica o status particolare dell'acquirente.

Come ottenere la detrazione?

Al momento della dichiarazione dei redditi, ti basterà presentare la fattura d'acquisto (scontrino) fornita dal punto vendita, insieme alla dichiarazione di conformità CE del dispositivo, che puoi scaricare all'interno delle pagine prodotto nel nostro sito web www.itechmedicaldivision.com

Non perderti i nostri contenuti: consigli utili per la tua terapia!

Iscriviti alla nostra newsletter.



www.itechmedicaldivision.com/newsletter/



I-TECH
Life

Ottieni il massimo
dalla tua terapia.

**Scarica
la nostra nuova app
e inizia il tuo percorso
terapeutico.**



I-TECH
MEDICAL DIVISION
a **IACER** brand

I.A.C.E.R. Srl

via Enzo Ferrari 2

30037 Scorzè (VE) - Italia

Tel.: (+39) 041/5401356

itechmedicaldivision.com

C.F. e P.Iva: IT00185480274

iacer@iacer.it

