

MANUALE DI UTILIZZO

MNPG378-03 Edizione 04/07/2022

FTI1000

Applicatore a fascia con antenna radiante

I.A.C.E.R. Srl

www.itechmedicaldivision.com

Introduzione

Il dispositivo **FTI1000** è un applicatore ad antenna radiante per magnetoterapia ad alta frequenza.

Risulta adattabile facilmente a qualunque zona del corpo grazie alla presenza dell'elastico terapeutico.

I dispositivi sono classificati classe I, conformemente alla regola 1 (4.1) di cui all'allegato VIII del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medici.

UDI-DI di base: 8019781PEMFHFASME

UDI-DI: 08019781113405

Informazioni tecniche

Caratteristiche tecniche:


- Dimensione applicatore: 37x9 cm + elastico;
- Lunghezza cavo: 158 cm;
- Antenna radiante;
- 1 cavo di collegamento;
- Compatibile esclusivamente con il modello MAG1000.

Etichettatura




Etichetta 1 / Label 1

Etichetta 1 - Label 1

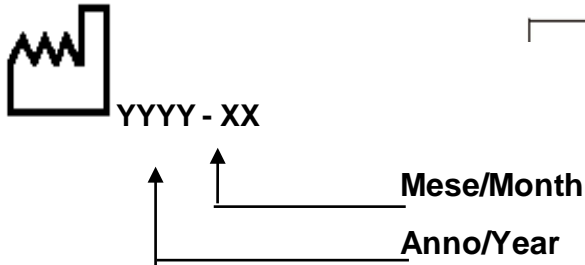



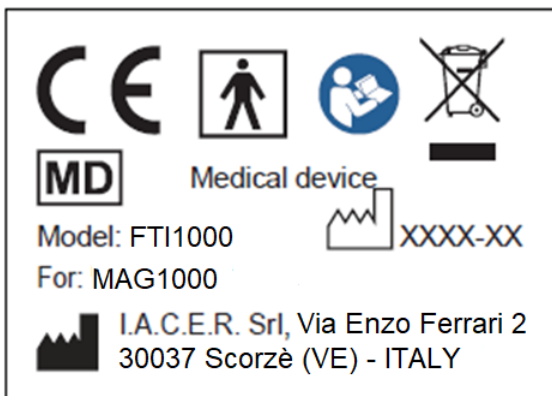




Etichetta cavo



Simboli:

Simbolo	Significato
	Logo del fabbricante.
	In conformità al regolamento (UE) n. 2017/745
	Dati Fabbricante.

Simbolo	Significato
	Data di fabbricazione (AAAA-MM).
	Dispositivo medico.
	Seguire le istruzioni per l'uso.
	Direttiva RAEE per lo smaltimento dei rifiuti elettronici.
	Parte applicata tipo BF.
	Temperature ammesse (temperature di stoccaggio, su confezione).
	Umidità relativa (umidità relativa di stoccaggio, su confezione).

Trasporto e immagazzinamento

Non vi sono particolari cure da usare durante il trasporto. Per quanto riguarda l'immagazzinamento, l'apparecchiatura è protetta fino alle seguenti condizioni ambientali:

temperatura ambiente da +5 a +40 °C

umidità relativa dal 30 al 80%

Modalità d'uso

Istruzioni per l'uso di FT11000


Seguire quanto riportato nel Manuale d'Uso in corredo al dispositivo in possesso.

Seguire le Avvertenze riportate nei manuali d'uso del prodotto MAG1000.

Pulizia di FTI1000

Per la pulizia di FTI1000 si raccomanda di scollegare l'applicatore dal dispositivo prima di compiere qualsiasi operazione. Procedere alla pulizia del tessuto con una spugnetta imbevuta in soluzione di acqua e alcool (soluzione al 20%) ed attendere la completa asciugatura prima di riutilizzare l'applicatore per una seduta terapeutica.

Informazioni per lo smaltimento

Il prodotto è soggetto alla normativa RAEE (presenza sull'etichetta del simbolo ) relativa alla raccolta differenziata: per lo smaltimento del prodotto, usare apposite aree attrezzate alla raccolta di materiale elettronico contattando le competenti autorità del proprio Paese o direttamente il fabbricante.

Manutenzione e Assistenza

Il dispositivo non prevede alcuna particolare manutenzione ordinaria. Si prega di contattare il fabbricante in modo che ogni due anni venga verificata la funzionalità del dispositivo. Il fabbricante è il solo esclusivista per interventi di assistenza tecnica sull'applicatore FTI1000. Per qualsiasi intervento di assistenza tecnica rivolgersi a:

I.A.C.E.R. S.r.l.

Via Enzo Ferrari, 2 • 30037 Scorzè (VE)

Tel. 041.5401356 • Fax 041.5402684

Garanzia

FTI1000 è coperto da garanzia di 2 anni a decorrere dalla data di acquisto. La garanzia decade in caso di manomissione, incuria ed uso inappropriato dell'applicatore ed in caso d'intervento sullo stesso da parte di personale non autorizzato dal costruttore o dal rivenditore autorizzato.

Segnalazione di incidenti

In ottemperanza alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/745, il fabbricante pone all'attenzione dell'utilizzatore la necessità di segnalare qualsiasi grave incidente verificatosi in relazione al dispositivo.

La segnalazione dovrà essere indirizzata:

- *al fabbricante del dispositivo:*

I.A.C.E.R. Srl

Via Enzo Ferrari 2 – 30037

Scorzè (VE) ITALY

Tel. +39 041 5401356 – Fax +39 041 5402684

e-mail: iacer@iacer.it



I.A.C.E.R. S.r.l.

Via Enzo Ferrari 2 - 30037, Scorzè (VE) – Italy

Tel.: (+39) 041 540 13 56 | Email: iacer@iacer.it

www.itechmedicaldivision.com

Share Capital: € 1.000.000 fully paid-up

Tax Code / VAT Number: IT 00185480274

Certified email: iacer@pec.it | SDI: SUBM70N