

# BENUTZERHANDBUCH

---

*MNPG388-03 Ausgabe 04/07/2022*

*TAP HF*

*I.A.C.E.R. Srl*

*[www.itechmedicaldivision.com](http://www.itechmedicaldivision.com)*

### **Erklärung**

Das **TAP HF-** Gerät ist eine Matte mit Strahlenden Antennen für die Hochfrequenz-Magnetfeldtherapie.

Es wurde entwickelt, um den Wirbelsäulenbereich zu behandeln, indem es auf die Rückenlehne eines Stuhls oder Sessels gelegt wird.

Das Produkt wird gemäß Regel 1 (4.1) in Anhang VIII der Verordnung (EU) 2017/745 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. April 2017 über Medizinprodukte der Klasse I zugeordnet.

Basis-UDI-DI: 8019781PEMFHFTAPPE

UDI-DI: 08019781113412

## Technische Informationen

### **Technische Merkmale:**


- Abmessungen des Applikators: 40x40 cm;
- Kabellänge: 158 cm;
- 2 strahlende Antennen;
- 2 Anschlusskabel;
- nur kompatibel mit Modell MAG1000.

## Kennzeichnung




Etikett 1 (Auf der Rückseite des Geräts)

Etikett 1 - Label 1

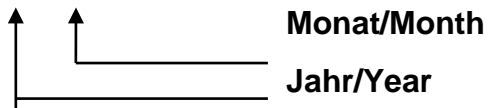



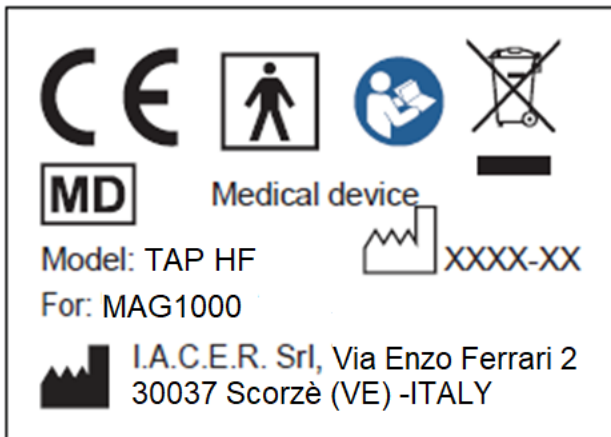






Kabel-Etikett



**Symbole**

Symbol	Bedeutung
	Logo des Herstellers.

Symbol	Bedeutung
	Im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 2017/745
	Hersteller-Daten.
	Herstellungsdatum (JJJJ-MM).
	Medizinprodukt
	Befolgen Sie die Bedienungsanleitung.
	WEEE-Richtlinie für die Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten
	Anwendungsteil Typ BF.
	Zulässige Lagerungstemperaturen (auf Verpackung).
	Relative Feuchtigkeit Lagerung (auf Verpackung).

### Transport und Lagern

Beim Transport ist keine besondere Vorsicht geboten. Bei der Lagerung ist das Gerät bis zu den folgenden Umgebungsbedingungen geschützt:

Umgebungstemperatur +5 bis + 40 °C

Relative Feuchtigkeit 30 bis 80%

## Verwendungsweise

### **Gebrauchsanweisungen für TAP HF**

*Befolgen Sie die Anweisungen in der Ihrem Gerät beiliegenden Bedienungsanleitung.*

*Beachten Sie die Warnhinweise in den Bedienungsanleitungen der Produkt MAG1000.*


## Pflege des TAP HF

### **Reinigung des TAP HF**

*Für die Reinigung des TAP HF wird empfohlen den Applikator zuvor vom Gerät zu trennen. Reinigen Sie den Stoff mit einem mit einer Lösung aus Wasser und Alkohol (20% Lösung) angefeuchteten Tuch und warten Sie, bis er vollständig getrocknet ist, bevor Sie den Applikator erneut für eine Therapiesitzung verwenden.*

### **Information zu Entsorgung**



*Das Produkt unterliegt den WEEE-Bestimmungen (Symbol  auf dem Etikett) in Bezug auf Mülltrennung: Bitte entsorgen Sie das Produkt bei speziellen Sammelstellen für elektronisches Material, indem Sie sich an die zuständigen Behörden in Ihrem Land oder direkt an den Hersteller wenden.*

### **Wartung und Kundendienst**

*Das Gerät erfordert keine besondere Routinewartung. Bitte wenden Sie sich an den Hersteller, um die Funktionsfähigkeit des Geräts alle zwei Jahre überprüfen zu lassen.*

*Der Hersteller ist der einzige Anbieter von technischem Support für den Applikator FTI1000.*

*Für technischen Support wenden Sie sich bitte an:*

**I.A.C.E.R. S.r.l.**

Via Enzo Ferrari, 2 • 30037 Scorzè (VE)

Tel. 041.5401356 • Fax 041.5402684

### **Garantie**

*Für den TAP HF gilt eine Garantie von 2 Jahren ab Kaufdatum. Die Garantie erlischt bei Manipulationen, mangelnder Sorgfalt oder unsachgemäßem Gebrauch des Applikators sowie*

bei Eingriffen am Applikator durch nicht vom Hersteller oder Vertragshändler autorisiertes Personal.

### **Schadensbericht**

In Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Verordnung (EU) 2017/745 weist der Hersteller den Benutzer auf die Notwendigkeit hin, jeden schweren Unfall im Zusammenhang mit dem Gerät zu melden.

Der Bericht muss adressiert werden:

- an den Gerätehersteller:

**I.A.C.E.R. Srl**

Via Enzo Ferrari 2 – 30037

Scorzè (VE) ITALY

Tel. +39 041 5401356 – Fax +39 041 5402684

e-mail: [iacer@iacer.it](mailto:iacer@iacer.it)





**I.A.C.E.R. S.r.l.**

Via Enzo Ferrari 2 - 30037, Scorzè (VE) – Italy

Tel.: (+39) 041 540 13 56 | Email: [iacer@iacer.it](mailto:iacer@iacer.it)

[www.itechmedicaldivision.com](http://www.itechmedicaldivision.com)

Share Capital: € 1.000.000 fully paid-up

Tax Code / VAT Number: IT 00185480274

Certified email: [iacer@pec.it](mailto:iacer@pec.it) | SDI: SUBM70N